

DAS AUFSETZEN UND ABSETZEN FORMSTABILER CONTACTLINSEN


DAS AUFSETZEN

1



Contactlinse auf die Spitze des Zeigefingers legen.

2

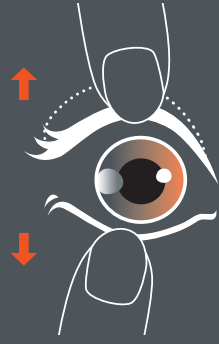

Ober- und Unterlid mit senkrecht gehaltenen Mittelfingern an den Wimpern direkt am Lidrand fassen und weit auseinander ziehen.

3



Mit der Fingerspitze Contactlinse auf die Hornhaut aufsetzen. Zum Entfernen evtl. eingeschlossener Luftbläschen Contactlinse mit Unterlid „anstubsen“.

4



Erst jetzt Lider vorsichtig loslassen und blinzeln. Überprüfen Sie, ob Sie deutlich sehen können.


DAS ABSETZEN: Methode 1

1



Geradeaus in den Spiegel blicken. Zeigefinger senkrecht in den Lidwinkel legen. Lider bewusst weit geöffnet halten.

2

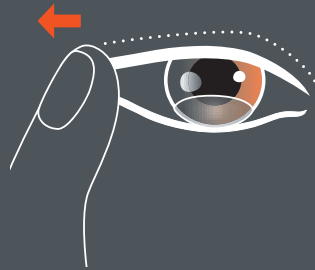

Ober- und Unterlidrand in Richtung Ohr straff ziehen. Bei straff gehaltenen Lidern nun blinzeln. Die Contactlinse löst sich so vom Auge und fällt in die geöffnete Hand.


DAS ABSETZEN: Methode 2

1



Ober- und Unterlid mit senkrecht gehaltenen Mittelfingern an den Wimpern direkt am Lidrand fassen. Leichten Druck auf die Lidränder ausüben.

2

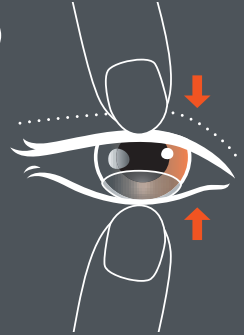

Die Lidränder „hebeln“ bei leichtem Zusammenschieben die Contactlinse vom Auge. Contactlinse fällt in die geöffnete Hand.

DAS AUFSETZEN UND ABSETZEN WEICHER CONTACTLINSEN

DAS AUFSETZEN

1

Seitenrichtig oder umgestülpt?



Seitenrichtig: schüsselförmig

Umgestülpt: tellerförmig (umgestülpt)

2


Seitenrichtig oder umgestülpt?



Seitenrichtig: Ränder stehen aufeinander zu.


Umgestülpt: Linsenränder legen sich auf die Fingerkuppen.

3

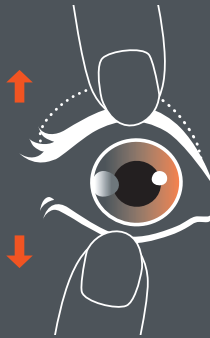

Ober- und Unterlid mit senkrecht gehaltenen Mittelfingern an den Wimpern direkt am Lidrand fassen und weit auseinander ziehen.

4

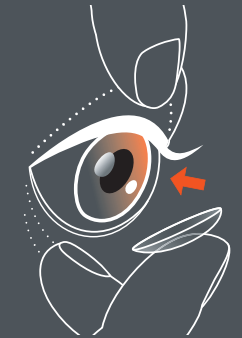

Mit der Fingerspitze Linse aufsetzen. Zum Entfernen evtl. eingeschlossener Luftblasen Linse mit Unterlid „anstubsen“. Erst jetzt Lider vorsichtig loslassen und blinzeln. Überprüfen Sie, ob Sie deutlich sehen können.

DAS ABSETZEN: Methode 1

1



Kopf nach vorn neigen und in den Spiegel blicken. Contactlinse mit dem Zeigefinger leicht nach unten (auf die Bindehaut) schieben.

2



Linse behutsam mit Daumen und Zeigefinger fassen und leicht falten. Vorsicht! Achten Sie darauf, Auge und Contactlinse nicht mit den Fingernägeln zu berühren.


DAS ABSETZEN: Methode 2

1



Ober- und Unterlid mit senkrecht gehaltenen Mittelfingern an den Wimpern direkt am Lidrand fassen. Leichten Druck auf die Lidränder ausüben.

2

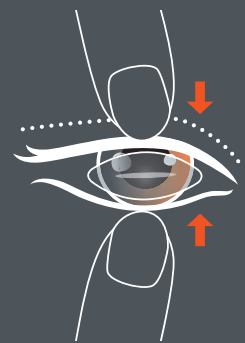

Mit Hilfe der Lidkanten wird die Contactlinse zusammen geschoben. Die Contactlinse fällt in die geöffnete Hand.

// ART. NR. 5306 / STAND 05-11

Lassen Sie Ihre Augen und Contactlinsen regelmäßig alle 6 Monate vom Spezialisten kontrollieren! Nur so lassen sich effektiv Contactlinsen-Unverträglichkeiten von vornherein ausschließen.

INDIVIDUELL & ANGEPASST.

EGO ist eine Marke von  wöhlk contactlinsen

WWW.EGO-CONTACTLINSEN.DE

EGO[®]
CONTACTLINSEN